



ORBITAL

SAĞLIK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.



T - GRNR 01 TETRAKET GÖRÜNÜR KLASİK

**ERGONOMİK
KANÜL SABİTLEME FLASTERİ**

**T-GRNR 01
KATALOG**

2025

+90 553 046 50 23

orbital.seba@gmail.com

Bardakçı Mh. Teknokent 2.Sk. Van Teknokent No:1/26 Tuşba / VAN

www.orbitalseba.com



(T-GRNR 01)
TETRAKET GÖRÜNÜR KLASİK
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ





(T-GRNR 01)
TETRAKET GÖRÜNÜR KLASİK
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ



Ürün Tipi/Ebat

Ergonomik Kanül Sabitleme Flasteri / (6,5 cm X 14,5 cm)

Ürün Kullanımı

Tek Kullanımlık - Kanül/Branül/İntraket Sabitleme Amacıyla

Ürün Özellikleri

- Esnek nonwoven taşıyıcı örtüden oluşan,
- Uzun süreli güçlü yapışkana sahip,
- Vücudun tüm kıvrımlarına uyumlu ergonomik tasarım,
- Kolay uygulanıp kolay çıkartılabilen,
- Tarih / Saat ve Uygulayıcı/ İmza belirteçleri bulunan,
- Şeffaf band desteğiyle gözlemlenebilir alanı olan.

- Hipoalerjenik,
- Non steril ,
- Hava geçirgen,
- X-Ray geçirgen.

Amaçlanan Kullanım

Yetişkin hasta popülasyonunda tıbbi profesyonellerin kullanımı için tasarlanmıştır.

Kontraendikasyonlar

Bileşenlerin herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontraendikedir.

Raf Ömrü/Sterilite

5 yıl / NON STERİL

Depolama Koşulları

15 °C ile 30 °C arasında serin ve rutubetsiz yerde saklayınız.

Bertaraf

Kullanıcının ülke yönetmeliklerine ve hastane / klinik protokollerine göre imha edilir.

Paketleme


Ürün Kodu
T-GRNR 01


Ebat
(6,5 cm x 14,5 cm)

Kutu İçi (Adet/Pc)
50

Koli İçi(Adet)
750

Semboller

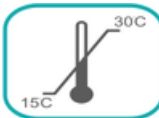

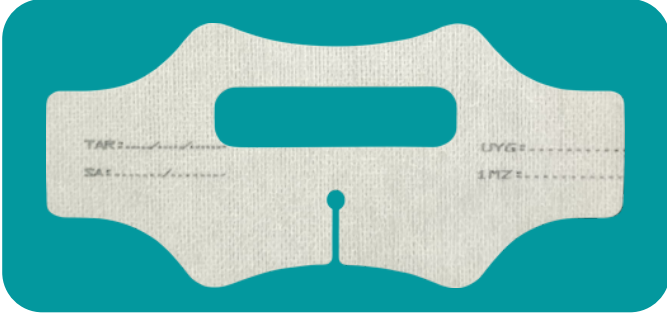

(T-GRNR 01)
TETRAKET GÖRÜNÜR KLASİK
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ



KULLANMA KILAVUZU

1



Tetraket
Kanül Sabitleme Flasterin
üzerindeki Tarih/Saat ve
Uygulayıcı /İmza belirteçlerini
yazın.

2



Periferel damar yolunu açtıktan
sonra şeffaf bandın altındaki
kağıdı sıyırarak yapışkanlı yüzeyi
açığa çıkarın.

3



Şeffaf bandı kanül üzerine
gelecek şekilde yerleştirin.

4



Tetraket
Kanül Sabitleme Flasterini
kanül üzerine, şeffaf alan
gözükcek şekilde yerleştirin.

5



Kelebek şeklindeki küçük destek
flasterini kanül altına gelecek
şekilde yerleştirin.

6



Tetraket
Kanül Sabitleme Flasterinin tüm
parçalarının yapışmasını
sağlayarak kanül sabitleme
işlemini tamamlayın.

! UYARILAR

- Bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontraendikedir.
- Kuru ve temiz cilde uygulayınız.
- Serin ve rutubetsiz yerde saklayınız.

UYGULAMA VİDEOSU



ORBITAL

HAKKIMIZDA

Orbital Sağlık Eğitim Biyoteknoloji LTD.ŞTİ.

2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Teknokent bünyesinde "Sağlık, Eğitim, Biyoteknoloji, Ar-Ge ve Danışmanlık" alanlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve malzemelerin, inovatif yöntemlerle tasarım, araştırma-geliştirme, üretim, satış ve pazarlama yapmak amacıyla, kaliteli ve yerli ürün üretimini yenilikçi yöntemlerle hasta ve sağlık profesyonellerine sunmayı hedefleyen girişimci bir firmadır.

MİSYON VE STRATEJİ

Firmamız; inovatif yöntemlerle hasta/çalışanlarda güvenliği ve memnuniyeti sağlayan, katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretimini hedefleyen, sağlık sektöründe değişim ve gelişime katkı sağlamayı stratejik hedef olarak belirlemiştir.

HİZMET ALANLARI

- SAĞLIK
- EĞİTİM
- BİYOTEKNOLOJİ
- ARGE VE DANIŞMANLIK

ÜRÜNLER

TETRAKET GÖRÜNÜR
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERLERİ

- T-GRNR 01 TETRAKET GÖRÜNÜR KLASİK
- T-GRNR 02 TETRAKET GÖRÜNÜR UZUN

Gerçek her zaman basittir...



TETRAKET SABİTLEME ÇÖZÜMLERİ

+90 553 046 50 23

orbital.seba@gmail.com

Bardakçı Mh. Teknokent 2.Sk. Van Teknokent No:1/26 Tuşba / VAN

www.orbitalseba.com