



# ORBİTAL

SAĞLIK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.



T - SRVS 02  
TETRAKET SERVİS UZUN

ERGONOMİK  
KANÜL SABİTLEME FLASTERİ

T-SRVS 02  
KATALOG

2025

+90 553 046 50 23

orbital.seba@gmail.com

Bardakçı Mh. Teknokent 2.Sk. Van Teknokent No:1/26 Tuşba / VAN

www.orbitalseba.com





( T-SRVS 02 )

TETRAKET SERVİS UZUN  
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ



8 683916 516050

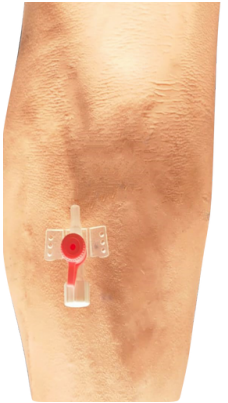

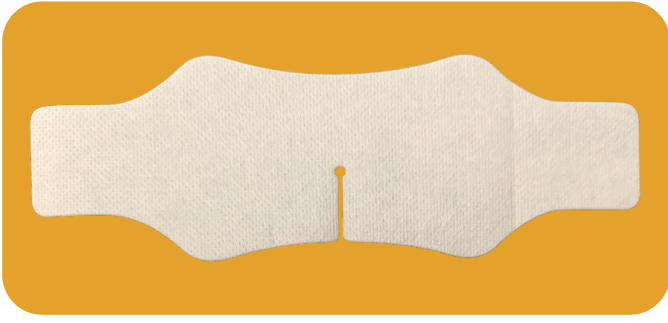

( T-SRVS 02 )

## TETRAKET SERVİS UZUN ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ



### Ürün Tipi/Ebat

Ergonomik Kanül Sabitleme Flasteri / (6,3 cm X 18,9 cm)

### Ürün Kullanımı

Tek Kullanımlık - Kanül/Branül/İntraket Sabitleme Amacıyla

### Ürün Özellikleri

- Esnek nonwoven taşıyıcı örtüden oluşan,
- Uzun süreli güçlü tutunmaya sahip,
- Vücudun tüm kıvrımlarına uyumlu ergonomik tasarımda,
- Kolay ve hızlı uygulanabilen,
- Kendiliğinden kolayca çıkmayan,

- Hipoalerjenik,
- Non steril ,
- Hava geçirgen,
- X-Ray geçirgen.

### Amaçlanan Kullanım

Yetişkin hasta popülasyonunda tıbbi profesyonellerin kullanımı için tasarlanmıştır.

### Kontraendikasyonlar

Bileşenlerin herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontraendikedir.

### Raf Ömrü/Sterilite

5 yıl / NON STERİL

### Depolama Koşulları

15 °C ile 30 °C arasında serin ve rutubetsiz yerde saklayınız.

### Bertaraf

Kullanıcının ülke yönetmeliklerine ve hastane / klinik protokollerine göre imha edilir.

### Paketleme


Ürün Kodu  
T-SRVS 02

Ebat  
(6,3 x 18,9 cm)

Kutu İçi (Adet/Pc)  
100

Koli İçi (Adet)  
5000

### Semboller

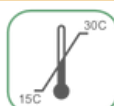



( T-SRVS 02 )

TETRAKET SERVİS UZUN  
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ

8 683916 516050

KULLANMA KILAVUZU

1



- Periferel damar yolunu açtıktan sonra Tetraket Kanül Sabitleme Flasterinin altındaki kağıdı sıyrarak yapışkanlı yüzeyi açığa çıkarın.

2



- Tetraket Kanül Sabitleme Flasterini kanül üzerine üstten birinci ürün gelecek şekilde yerleştirin.

3



- Tetraket Kanül Sabitleme Flasterini kanül üzerine alttan ikinci ürün gelecek şekilde yerleştirin.

4



- Tetraket Kanül Sabitleme Flasterinin yapışmasını sağlayarak kanül sabitleme işlemini tamamlayın.

**UYARILAR**

- Bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontraendikedir.
- Kuru ve temiz cilde uygulayınız.
- Serin ve rutubetsiz yerde saklayınız.

UYGULAMA VİDEOSU



# ORBITAL

## HAKKIMIZDA

Orbital Sağlık Eğitim Biyoteknoloji LTD.ŞTİ.  
2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Teknokent bünyesinde "Sağlık, Eğitim, Biyoteknoloji, Ar-Ge ve Danışmanlık" alanlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve malzemelerin, inovatif yöntemlerle tasarım, araştırma-geliştirme, üretim, satış ve pazarlama yapmak amacıyla, kaliteli ve yerli ürün üretimini yenilikçi yöntemlerle hasta ve sağlık profesyonellerine sunmayı hedefleyen girişimci bir firmadır.

## MİSYON VE STRATEJİ

Firmamız; inovatif yöntemlerle hasta/çalışanlarda güvenliği ve memnuniyeti sağlayan, katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretimini hedefleyen, sağlık sektöründe değişim ve gelişime katkı sağlamayı stratejik hedef olarak belirlemiştir.

## HİZMET ALANLARI

- SAĞLIK
- EĞİTİM
- BİYOTEKNOLOJİ
- ARGE VE DANIŞMANLIK

## ÜRÜNLER

TETRAKET SERVİS  
ERGONOMİK KANÜL SABİTLEME FLASTERİ

- T-SRVS 01 TETRAKET SERVİS KLASİK
- T-SRVS 02 TETRAKET SERVİS UZUN

**Gerçek her zaman basittir...**



# TETRAKET SABİTLEME ÇÖZÜMLERİ

+90 553 046 50 23

orbital.seba@gmail.com

Bardakçı Mh. Teknokent 2.Sk. Van Teknokent No:1/26 Tuşba / VAN

www.orbitalseba.com